

MODE D'EMPLOI DES CARTES DE PRELEVEMENT

LE MATERIEL que nous vous remettons comprend :

- 1- Une lancette Safe-T-Pro Plus
- 2- Une carte de prélèvement
- 3- Une notice explicative
- 4- Une enveloppe – libellée à notre nom – pour l'expédition des cartes.

LA METHODE

- 1- Répondre **soigneusement** et **complètement** à toutes les demandes de **renseignements** inscrits sur la carte. N'oubliez pas la **date de naissance**.
- 2- Après **stérilisation** de la peau à l'éther ou à l'alcool *, **piquer le talon de l'enfant** avec le Safe-T-Pro Plus. La piqûre doit être franche et les **gouttes de sang** doivent se former spontanément.
- 3- Remplir par imbibition chacun des cercles de la carte de prélèvement avec une goutte de sang :
 - . en une seule fois ;
 - . sans surchargede façon à ce que la tâche de sang soit uniforme.



Recto Verso
BON



Recto Verso
MAUVAIS




Recto Verso
TRES MAUVAIS

INUTILISABLE


4-Laisser sécher la carte à l'air.

Faire parvenir le prélèvement au laboratoire dans les meilleurs délais.

3 ETAPES SIMPLES

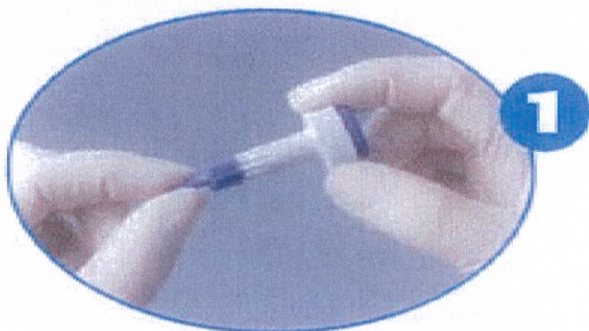


1- Tenir Accu-Chek Safe-T-Pro Plus et retirer le manchon stérile violet en le dévissant, puis jeter le manchon.

 *N'utilisez pas l'autopiqueur si le manchon stérile a été retiré auparavant, car sa stérilité n'est plus assurée.*



2- Sélectionner la profondeur de piqûre désirée en tournant la bague de réglage (**niveau 2 Moyen**)

 *Départ usine, la profondeur de piqûre est réglée sur « piqûre moyennement profonde ». Ne pas régler la profondeur de piqûre avant d'avoir retiré le manchon stérile.*



3- Presser légèrement Accu-Chek Safe-T-Pro Plus **CONTRE LE TALON DU BEBE** puis appuyer sur le bouton violet (**niveau 2 Moyen**)

* *Attention : s'assurer que la peau a bien séchée avant de réaliser la piqûre : le mélange de l'alcool avec le sang peut dénaturer ce dernier.*