

Recherche de CRYOGLOBULINE / CRYOFIBRINOGENE

(codes CIRUS : CRYO / CRYOFI)


PRELEVEMENT et acheminement à 37°C - fiche de traçabilité CHU LILLE

Partie réservée au service clinique

IDENTIFICATION DU PATIENT

NOM : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ NOM MARITAL : \_\_\_\_\_  
 SEXE :  H  F Date de Naissance : \_\_\_\_\_

Analyse à programmer, pour respecter la chaîne à 37°C (cf Fiche Mémo Cryoprotéines : disponible dans le catalogue des analyses du Centre de Biologie Pathologie)  
 Tel au 35588 pour réserver une valisette si nécessaire

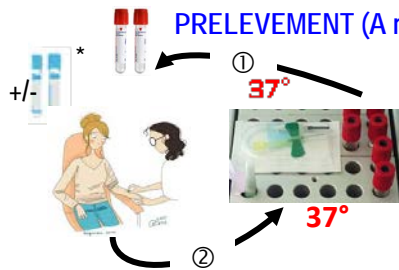

PRELEVEMENT (A remplir par le préleveur) : patient à jeun  
 du lundi au vendredi matin (jours ouvrés) de 7 heures à 15 heures

sur tubes de sang et aiguilles préchauffés à 37°C (au moins 15 minutes)  
 cryoglobuline : 2 tubes secs de 7 mL bien remplis  
 \*cryofibrinogène : 2 tubes secs 7mL et 2 tubes citratés 5 mL bien remplis

DATE :     2 0   à :   H   mn

- (1 et 2 et 3 cochés :  
 ☞ prélèvement conforme)
- 1 Patient à jeun :  OUI  NON
  - 2 TUBES remplacés immédiatement à 37°C :  OUI  
 dans la valisette / bloc chauffant : N°
  - 3 FICHE remplie déposée avec les tubes :  OUI

☞ prévenir la régulation au poste 35 588 pour enlèvement

Visa du préleveur :

RECEPTION AU RTE (A remplir par le RTE) :

CONTRÔLE A LA RECEPTION : reçu à : horodater ci-dessous \_\_\_\_\_

Valisette à 37 ± 2 °C :  OUI  NON

Fiche reçue sans tube :  (dans ce cas ne pas cocher la ligne au-dessus)

**ORIENTATION RAPIDE VERS L'UF8833 TOUJOURS A 37°C**

UF 8833 Biochimie des protéines : complété par : visa :

RECEPTION AU LABORATOIRE : le     2 0   à   H   min

Si nécessaire, compléter la non-conformité sur Molis pour le patient

CONTRÔLE A LA RECEPTION : T° affichée : .....

HORODATAGE RTE