

Recherche de CRYOGLOBULINE / CRYOFIBRINOGENE

(codes CIRUS : CRYO / CRYOFI)

PRELEVEMENT et acheminement à 37°C - Fiche de traçabilité CHU LILLE


Partie réservée au service clinique

IDENTIFICATION DU PATIENT

NOM : _____ Prénom : _____ NOM MARITAL : _____
 SEXE : H F Date de Naissance : _____

Analyse à programmer, pour respecter la chaîne à 37°C (cf Fiche Mémo Cryoprotéines : disponible dans le catalogue des analyses du Centre de Biologie Pathologie)
 Tel au 35588 pour réserver une valisette si nécessaire

PRELEVEMENT (A remplir par le préleveur) : patient à jeun
 du lundi au vendredi matin (jours ouvrés) pour enlèvement **avant 11 heures**

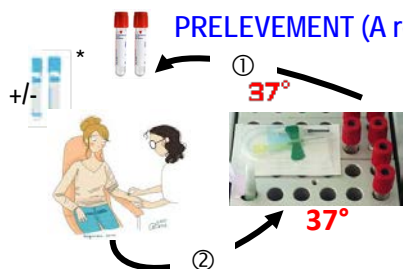

sur tubes de sang et aiguilles préchauffés à 37°C (au moins 15 minutes)
 cryoglobuline : 2 tubes secs de 7 mL bien remplis
 *cryofibrinogène : 2 tubes secs 7mL et 2 tubes citratés 5 mL bien remplis

DATE : 2 0 à : H mn

- (1 et 2 et 3 cochés:
 ☞ prélèvement conforme)
- 1 patient à jeun : OUI
 - 2 TUBES remplacés immédiatement à 37°C : OUI
 dans la valisette / bloc chauffant : N°
 - 3 FICHE remplie déposée avec les tubes : OUI

☞ prévenir la régulation au poste 35 588 pour enlèvement

Visa du préleveur :

RECEPTION AU RTE (A remplir par le RTE) :

CONTRÔLE A LA RECEPTION : reçu à : horodater ci-dessous _____

Valisette à 37 ± 2 °C : OUI NON

ORIENTATION RAPIDE VERS L'UF8833 TOUJOURS A 37°C

UF 8833 Biochimie des protéines : (A remplir par le technicien)

RECEPTION AU LABORATOIRE : le 2 0 à H min

Si nécessaire, compléter la non-conformité sur Molis pour le patient

CONTRÔLE A LA RECEPTION : T° affichée :

HORODATAGE RTE

