

FICHE MEMO CRYOPROTEINES

Cryoglobuline / Cryofibrinogène = toujours à 37°C

prélever du lundi au vendredi matin (jours ouvrés): entre 7H et 15H

~~TAL~~
~~Urgence~~

*Dernier enlèvement par les pédestres avant 15h

Analyse à **programmer**, impératifs à respecter

1 Patient à jeun

+

2 Tubes sang et aiguilles préchauffés à 37°C (au moins 15 min)

Cryoglobuline:
2 tubes secs 7 mL



Cryofibrinogène:
2 tubes secs 7 mL +
2 tubes citratés 5 mL



thermobloc
à demeure



vue
intérieure



valisette du laboratoire



à réserver la veille au **35 588**
demander l'enlèvement au **35 588**

Tubes à replacer immédiatement
à 37°C après le prélèvement

+

3 Fiche de traçabilité acheminement du prélèvement remplie

1 + 2 + 3



Prélèvement conforme